

Voorkom decubitus  
door automatische  
wisselgging!



WE|ZIJN VOOR IEDEREEN

# **EKAMOVE**

Automatische wisselgging op maat


# KIES VOOR PERSOONLIJKE WISELLIGGING

Wist u dat Q Care exclusief distributeur is van de Ekamove in Nederland? De Ekamove geeft automatische wisselgigging aan een bedlegerige cliënt zonder de hulp van een verpleegkundige of zorgverlener. Het systeem bevat uitgebreide instellingsmogelijkheden, waardoor wisselgigging nauwkeurig op de situatie van de cliënt kan worden ingesteld. Bij de Ekamove is zowel de linker- als rechterzijde individueel instelbaar. Dit kan tot maximaal 30° graden. Ook is het mogelijk om beide zijdes gecombineerd in te zetten voor een optimale persoonlijke wisselgigging.

Het systeem bevat twee luchtcompartimenten, elk voorzien van een sensor, die op de bedbodem bevestigd worden. Door middel van een tweetal slangen worden deze luchtcompartimenten verbonden met het Ekamove bedieningspaneel. Via dit bedieningspaneel is de wisselgigging in tijd en laterale positie instelbaar! De Ekamove voorziet tevens in een zorgstand, waardoor de automatische positionering tijdelijk stopgezet kan worden voor de duur van de verzorging.

De Ekamove is vanwege onderstaande eigenschappen onmisbaar voor de behandeling van decubitus:

- Géén extra werkzaamheden of fysieke belasting voor zorgverleners om wisselgigging toe te passen;
- Optimale drukverdeling, afgestemd op de situatie van de cliënt, ter preventie en behandeling van decubitus;
- Positionering is automatisch instelbaar voor zowel overdag als in de avond en nacht;
- Door de zachte wijze van wisselgigging uitermate geschikt voor cliënten die veel pijn ondergaan;
- De cliënt hoeft niet wakker te worden gemaakt, wat een gezonde nachtrust ten goede komt;
- Uitgebreide instellingsmogelijkheden voor een persoonlijke automatische wisselgigging voor de cliënt.

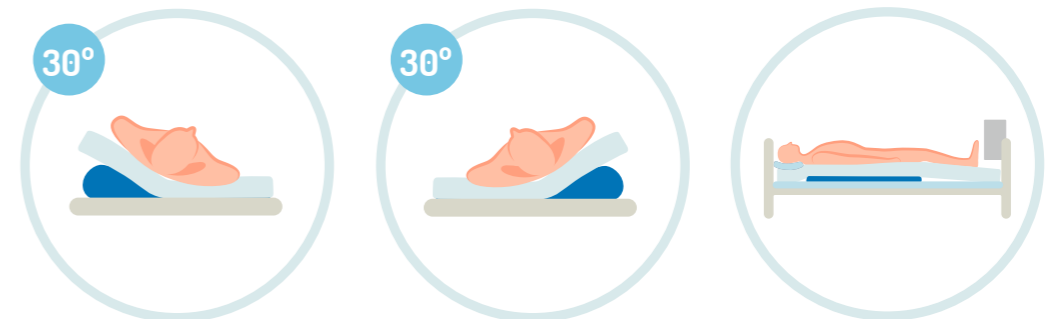

➤ De Ekamove is een automatisch wisselgigging systeem dat de bedlegerige cliënt automatisch voorziet van wisselgigging zonder de hulp van een zorgverlener. Stel nauwkeurig afgestemde wisselgigging in op de persoonlijke situatie van de cliënt.

## Exclusief distributeur Ekamove

Q Care is de **exclusieve distributeur** voor Ekamove in Nederland. Wij zijn uw partner als het gaat om **verkoop, verhuur, service** en **onderhoud** van dit innovatieve systeem voor automatische wisselgigging. Daarnaast kunnen wij u ook service- en onderhoudscontracten aanbieden. Wilt u meer informatie van onze Ekamove-adviseurs of onderhoud aan uw systeem bij ons inplannen? Neem dan contact met ons op via [info@qcare.nl](mailto:info@qcare.nl) of bel naar **013 522 06 06**.

## Voor wie is de Ekamove geschikt?

De Ekamove is overal inzetbaar. Van **thuiszorg** tot aan **verpleeghuis**. Het Ekamove systeem is ideaal om in te zetten bij cliënten die risico lopen decubitus te ontwikkelen. De Ekamove neemt de wisselgigging automatisch over en vermindert daardoor de **impact** en **werkdruk** op de persoon die de verzorgende rol op zich neemt.

## Onderhoud, reiniging & desinfectie

Als exclusief distributeur van de Ekamove hebben we de expertise en diensten in huis om **onderhoud, technische keuringen** en **updates** te verzorgen voor de Ekamove. Q Care biedt u de mogelijkheid om periodiek uw eigendomssystemen te controleren en technisch te onderhouden, waardoor u altijd een hoogwaardig systeem heeft. Daarnaast kan de Ekamove door Q Care professioneel gereinigd en gedesinfecteerd worden, in een daarvoor speciaal voor Q Care ontwikkelde professionele wasstraat. Zo voldoen onze anti-decubitus hulpmiddelen altijd aan de geldende kwaliteitsnormen. Wij reinigen en desinfecteren uw Ekamove systeem altijd conform de internationale standaarden **ISO 9001 & ISO 13485** voor medische hulpmiddelen.



Interesse?

Neem contact met ons op!

☎ 013 522 06 06





30°  
Instelbaar lateraal  
positioneringssysteem  
met sensorbediening

EXCLUSIEF  
PARTNER  
EKAMOVE  
\*\*\*



## Over Q Care wond- en decubituszorg

Q Care is een autoriteit op het gebied van wond- en decubituszorg. Wij bieden praktische wond- en decubituszorg aan elke cliënt die daar behoefte aan heeft. Naast gespecialiseerde wond- en decubitusverpleegkundigen, zorgen wij ook voor de juiste hulpmiddelen! Van anti-decubitusmatras tot aan wondzorg. Daarnaast verzorgen we op maat én merkonafhankelijk de anti-decubitus hulpmiddelen die voor preventie en behandeling nodig zijn. **Welzijn voor iedereen** is daarin de centrale gedachte. Om hierin maximaal succesvol te zijn worden we ondersteund door **Q Care Service & Producten** en **Q Care Academie**.