

Noodprotocol stroomuitval pomp – NSPQC010122

Wanneer de netspanning wegvalt en er geen spanning meer staat op de pomp zijn er 5 mogelijkheden.



- 1 AD-matras blijft op druk door pompslangen met elkaar te verbinden.
- 2 AD-matras blijft op druk door afsluitdop te bevestigen.
- 3 AD-matras is niet op druk te houden.
- 4 AD-matras maakt gebruik van een pomp met ingebouwde accu.
- 5 AD-matras blijft altijd op druk (schuimmatras met luchtbanen).

1 AD-matras blijft op druk door pompslangen met elkaar te verbinden.

Door de 2 pompslangen uit het systeem te halen en met elkaar te verbinden blijft de druk in het anti-decubitus matras voor een bepaalde periode behouden! Zie onderstaande afbeeldingen voor verdere instructies.



Soort systeem	Hoelang blijft matras op druk?	Instellingen bij reset?
Duocare	1 - 2 uur	<u>Niet</u> gewist! ●
Entrix	1 - 2 uur	<u>Niet</u> gewist! ●
Q Vive Aqua (Plus)	1 - 2 uur	<u>Niet</u> gewist! ●
Q Vive Mint	1 - 2 uur	<u>Niet</u> gewist! ●
Q Vive Lime (Plus)	1 - 2 uur	<u>Niet</u> gewist! ●
Revo	1 - 2 uur	<u>Niet</u> gewist! ●

- Systeem wordt automatisch gereset naar vorige gebruikersinstellingen.
- Neem contact op met onze klantenservice via **013 522 06 06** om direct de juiste instellingen af te stemmen.
- Noodprotocol digitaal bekijken kan via qcare.nl/noodprotocol-stroomuitval

2 AD-matras blijft op druk door afsluitdop te bevestigen of dicht te draaien.

Soort systeem	Hoelang blijft matras op druk?	Instellingen bij reset?
Diamond	Altijd	<u>Wel</u> gewist! ●
Ruby	Altijd	<u>Niet</u> gewist! ●
Quattro (Plus)	Altijd	<u>Wel</u> gewist! ●

- Uw systeem niet kunnen terugvinden in het overzicht? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.



3 AD-matras is niet op druk te houden. Neem contact op met Q Care.

Soort systeem	Hoelang blijft matras op druk?	Instellingen bij reset?
Primo	Niet	<u>Wel</u> gewist! 
Q Vive Fuchsia	Niet	<u>Niet</u> gewist! 
Xilos	Niet	<u>Wel</u> gewist! 

 Systeem wordt automatisch gereset naar vorige gebruikersinstellingen.

 Neem contact op met onze klantenservice via **013 522 06 06** om direct de juiste instellingen af te stemmen.

 Noodprotocol digitaal bekijken kan via qcare.nl/noodprotocol-stroomuitval

 Uw systeem niet kunnen terugvinden in het overzicht? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.



4 AD-matras maakt gebruik van een pomp met ingebouwde accu.

Soort systeem	Hoelang blijft matras op druk?	Instellingen bij reset?
Aeros	2 uur	<u>Niet</u> gewist!
Q Vive Blue Ocean (Plus)	2 uur	<u>Niet</u> gewist! 
Q Vive Maroon	1 uur	<u>Niet</u> gewist! 



AD-matras blijft altijd op druk (schuimmatras met luchtbanen).

Soort systeem	Hoelang blijft matras op druk?	Instellingen bij reset?
Curocell Cirrus	Altijd	<u>Niet</u> gewist!
Q Vive Amber	Altijd	<u>Niet</u> gewist! 
Q Vive Terra	Altijd	<u>Niet</u> gewist! 



Bij spoed & calamiteiten buiten kantooruren!

Voor spoedgevallen buiten kantooruren zijn we 24-uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op  **013 522 06 06**